

Datum:

Číslo šarže:

Exp:

10, rue Ettore Bugatti BP6 – 67038 Strasbourg Cedex 2- FRANCE

T : +33 (0)3 88 78 80 88 - F: +33 (0)3 88 78 76 78 - **Web Site:** www.alldiag.com

ALL. DIAG SA

Vzorek	IgG	IgA	CHLAMYCHECK IgG & IgA®	Band/Proužek			Vyhodnocení Pokud je součet bodů: ≤ 3 => Negativní 4-5 => Hraniční ≥ 6 => Pozitivní
				C. <i>trachomatis</i>	C. <i>pneumoniae</i>	C. <i>psittaci</i>	

Control | C.trachomatis | C.pneumoniae | C.psittaci

Peak-Ko IgG Cut-off	MOMP	OMP2	HSP60	MIP	MOMP	OMP2	OMP4	OMP5	MOMP	G	C. <i>trachomatis</i>	C. <i>pneumoniae</i>	C. <i>psittaci</i>
	6	2	1	3	6	6/4*	3	3	6/4**	A			
	6	3	3	3	6	4	4	4	6/4**				

*= 6 bodů, pokud Ch. trachomatis je negativní, jinak 4 body, **= 6 bodů, pokud MOMP u Ch. trachomatis nebo u Ch. pneumoniae je negativní, resp., jinak 4 body